

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド 11661000

BVI 角膜用ライトシールド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- *・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】


- * 本品は、ソフトで均一な気孔のある極薄い円形の PVA スポンジで角膜の上に乗せることで、網膜に有害な光線を遮断する。

〈形状及び寸法〉

形状	用途	寸法
円形状	ライトシールド	直径 6～10mm

〈外観写真〉

代表例

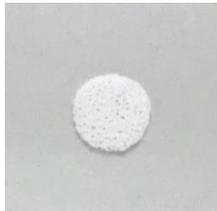

- * 原材料:ポリビニルアルコール

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置時、眼内を観察する必要がない時に網膜に有害な光線を遮断し、網膜を保護する。

【使用方法等】

本品を角膜上に乗せ、網膜に有害な光線を遮断し保護する。

【使用上の注意】

- ・使用前は、先端部分に埃、異物等が付着していないことを確認すること。
- *・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**〈貯蔵・保管方法〉**

- ・水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・梱包材料に傷を付けたリ、ピンホールを生じないように保管すること。

〈有効期間〉

- * 3年（自己認証による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

** Tel : 0120-991-092

** 外国製造業者：

メドソープ ドミニカナ、エス、エイ、

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名：ドミニカ共和国