

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド 11661000

LASIK用ドレーン


再使用禁止

* **【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はPVA製パッドのLASIKドレーン／シールドである。

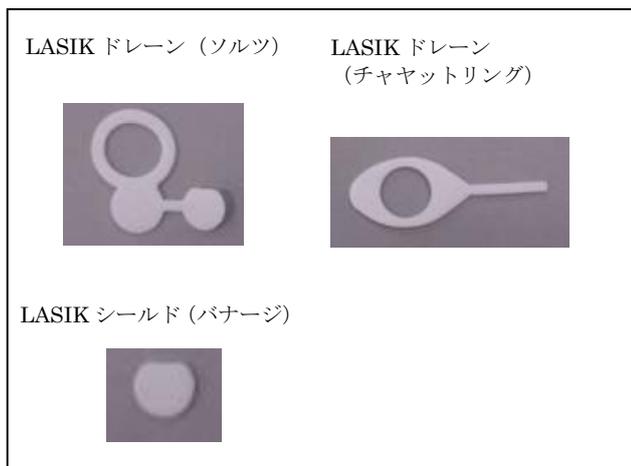

【使用目的又は効果】

本品は眼の施術部及び施術部周辺の余分な水分を吸収する他、眼を保護する目的で使用される。本品は滅菌済みで、単回使用である。

* **【使用方法等】**

眼科手術時等において本品を用いて施術部及び施術部周辺の余分な水分を吸収する。また、角膜フラップを保護したり位置を調整したりする。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。〕
- ・使用中に本品が破損した場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- * 本品にアレルギーを示す患者には慎重に使用すること。

* **【保管方法及び有効期間等】**

〈貯蔵・保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

* 〈有効期間〉

5年（自己認証による。）

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

** Tel：0120-991-092

** 外国製造業者：

メドソープ ドミニカナ、エス、エイ、

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名：ドミニカ共和国