

機械器具 35 医療用はさみ
管理医療機器 単回使用眼科用せん刀 35327002
(単回使用はさみ 35325002)

Malosa シングルユース シザーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

本品には形状の違いで複数の種類がある。ハンドル部に樹脂のグリップが付属するタイプとしないタイプがある。

外観(代表例)



2. 原理

ハンドル部の操作と連動して先端部が開閉し、組織等を切断することができる。

3. 主な材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

眼科手術時の組織の切断に用いる、又は医療用の単回使用はさみとして用いる。

【使用方法等】

1. 使用前準備

- 1) 滅菌包装に破損等の異常がないことを確認し、本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。先端部分が周りに触れないように滅菌包装から取り出す。
- 2) 本品に破損等の異常がないことを目視で確認する。

2. 使用中の操作

ハンドル部の操作により先端部を開閉させ、組織等の切断を行う。

3. 使用後の処置

本品は再使用できないので、使用後は廃棄する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・使用前に包装に記載されている有効期限、滅菌包装の破損の有無を確認すること。
- ・本品は1回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしないこと。
- ・未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

〈相互作用〉

併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- ・電気メスなどの電気手術器

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel: 0120-991-092

外国製造業者:

Beaver-Visitec International Limited

国名: 英国