

機械器具 36 医療用ピンセット  
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット 16209002（単回使用ピンセット 35079002）

## Malosa シングルユース フォーセツプ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【形状、構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は、眼組織及び周辺組織をはじめとする組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる機器である。保持する物体を閉じて挟む2枚の先端部をもつ。本品は単回使用であり、再使用はできない。

##### 2. 外観

本品には形状の違いで複数の種類がある。またハンドル部に樹脂のグリップが付属するタイプと付属しないタイプがある。

外観図（代表例）



##### 3. 材質

先端部、ハンドル部：ステンレス鋼  
グリップ：樹脂材料

#### 【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセット又は単回使用ピンセットとして用いること。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用前準備

- 1) 滅菌包装に破損等の異常がないこと確認し、本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。先端部分が周りに触れないように滅菌包装から取り出す。
- 2) 本品に破損等の異常がないことを目視で確認する。

##### 2. 使用中の操作

眼組織及び周辺組織等の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合を行う。

##### 3. 使用後の処置

本品は再使用できないので、使用後は廃棄する。

#### 〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- ・未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

#### 〈相互作用〉

##### 併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- ・電気メスなどの電気手術器

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

##### 〈有効期間〉

外箱及び個包装に記載。（自己認証による。）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel：0120-991-092

##### 外国製造業者：

Beaver-Visitec International Limited

国名：英国