

類別：機械器具 35 医療用はさみ  
管理医療機器 単回使用眼科用せん刀 JMDNコード：35327002

## Vitrex ディスポーザブル シザーズ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：  
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社  
\* Tel：0120-991-092

外国製造業者：  
Vitrex B.V.  
国名：オランダ王国

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、眼科手術時に組織を切断するために用いる眼科用手術機器であり、単回使用である。

品目名	
20G	ディスポ 20G 垂直剪刀
	ディスポ 20G マイクロ剪刀 直
	ディスポ 20G マイクロ剪刀 曲
23G	ディスポ 23G 垂直剪刀
	ディスポ 23G マイクロ剪刀 直
	ディスポ 23G マイクロ剪刀 曲
25G	ディスポ 25G 垂直剪刀
	ディスポ 25G マイクロ剪刀 直
	ディスポ 25G マイクロ剪刀 曲
27G	ディスポ 27G 垂直剪刀
	ディスポ 27G マイクロ剪刀 曲

#### 【材質】

先端部：ステンレススチール  
20G シャフト：ステンレススチール  
23, 25, 27G シャフト：ニッケル-コバルト-クロム-モリブデン合金

#### 【使用目的又は効果】

眼科手術時の組織の切断等に用いる。

#### 【使用方法等】

- ・本品を無菌的に開封する。
- ・本品はディスポーザブル製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
- ・滅菌包装から本品の先端部が周りに触れないように取り出し、使用する。
- ・ハンドルの開閉操作により先端部を開閉させ、眼組織の切断等を行う。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、直接触れないこと。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。  
[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

##### 〈相互作用〉

##### 併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管：高温、多湿、直射日光、水漏れを避けること