

類別: 機械器具 36 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット JMDNコード: 16209002

Vitrex ディスポーザブル フォーセプス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる機器であり、単回使用である。

品目名	
20G	ディスポ 20G セレイテッド鉗子
	ディスポ 20G ILM エンドグリップ鉗子
	ディスポ 20G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	ディスポ 20G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
23G	ディスポ 23G セレイテッド鉗子
	ディスポ 23G ILM エンドグリップ鉗子
	ディスポ 23G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	ディスポ 23G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
	ディスポ 23G クーン氏 パワー鉗子 45°
	ディスポ 23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°
25G	ディスポ 25G セレイテッド鉗子
	ディスポ 25G ILM エンドグリップ鉗子
	ディスポ 25G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	ディスポ 25G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
	ディスポ 25G クーン氏 パワー鉗子 45°
	ディスポ 25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°
27G	ディスポ 27G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	ディスポ 27G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
	ディスポ 27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

【材質】

先端部: ステンレススチール
20G シャフト: ステンレススチール
23, 25, 27G シャフト: ニッケル-コバルト-クロム-モリブデン合金

【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

【使用方法等】

- ・本品を無菌的に開封する。
- ・本品はディスポーザブル製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
- ・滅菌包装から本品の先端部が周りに触れないように取り出し、使用する。
- ・ハンドルの開閉操作により先端部を開閉させ、眼組織の切断等を行う。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、直接触れないこと。
 - ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。
- [本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

〈相互作用〉

併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

【保管方法及び有効期間等】

保管: 高温、多湿、直射日光、水漏れを避けること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

* Tel: 0120-991-092

外国製造業者:

Vitrex B.V.

国名: オランダ王国