

機械器具 36 医療用ピンセット  
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット 16209002

## VITREQ ディスポーザブル フォーセプス

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる機器であり、単回使用である。

サイズ	品名
23G	23G セレイテッド鉗子
	23G ILM エンドグリップ鉗子
	23G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	23G エッカード氏 ILM 鉗子(エンドグリップ)
	23G クーン氏 パワー鉗子 45°
25G	25G セレイテッド鉗子
	25G ILM エンドグリップ鉗子
	25G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子
	25G エッカード氏 ILM 鉗子(エンドグリップ)
	25G クーン氏 パワー鉗子 45°
27G	25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°
	27G ILM エンドグリップ鉗子
	27G エッカード氏 ILM 鉗子(エンドグリップ)
	27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

##### 2. 外観



	名称
①	先端部
②	シャフト
③	ハンドル(サイズにより色が異なる)

##### 先端部形状

セレイテッド鉗子	ILM エンドグリップ鉗子	エイシメトリカル エンドグリップ鉗子
エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)	クーン氏 パワー鉗子 45°	シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

##### 3. 材質

先端部:ステンレス鋼

シャフト:ニッケル-コバルト-クロム-モリブデン合金

#### 【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

#### 【使用方法等】

- ・本品を無菌的に開封する。
- ・滅菌包装から本品の先端部が周りに触れないように取り出し、使用する。
- ・ハンドルの開閉操作により先端部を開閉させ、眼組織の把持等を行う。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、直接触れないこと。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。  
[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]
- ・眼内への挿入および取り出しは、先端部を閉じた状態で行うこと。

##### 〈相互作用〉

###### 併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

##### 〈有効期間〉

包装に記載。[自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel:0120-991-092

外国製造業者: Vitreq B.V.

国名:オランダ王国