

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

Vitrex ライトソース アダプター

【形状・構造及び原理等】

・概要

本品は、光源装置で発生した光を本品を介して伝達することにより、プローブに照明光を供給することを目的としている。

・外観

本品には形状の違いで複数の種類がある。


LF00. R01



LF00. R02



LF00. R03

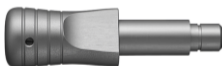

LF00. R05



・材質：アルミニウム、ステンレス

【使用目的又は効果】

本品は、指定のプローブに光源を発する装置の接続を可能にするために用いるコネクタである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

1. アセンブリを作製する光源の接続部形状に合った形状品を選択する。
2. 本品の接続部分に曲がり等の損傷がないか確認する。

2. 使用方法

1. 本品のハンドル部にプローブのライトコネクタを挿入接続し、ねじで固定する。
2. 使用する光源に本品を接続する。
3. 接続にゆりみがないか確認する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・併用する医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- ・本品はリユース可能な製品であるが、曲がりや破損等の損傷があった場合は再使用できない。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
洗浄や清拭を行った場合、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
Tel：0120-991-092

外国製造業者：Vitrex B. V.
国名：オランダ王国