

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

## アイドレイン

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

眼の各組織上の体液や薬液等を吸水する細長いスポンジ部分と、吸水した液体等を受水するポリエチレン袋が付いている。

#### \*\*〈形状〉

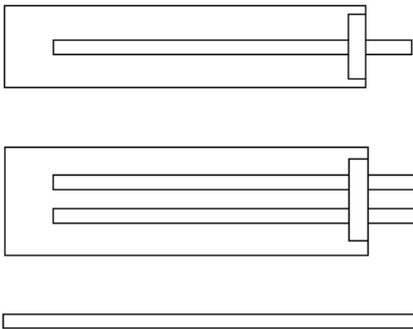

本体: PVA (ポリビニルアルコール)  
袋: ポリエチレン

#### 【使用目的又は効果】

眼科手術・処置の際、強膜等、眼の各組織の水分や体液等を吸水し、手術をスムーズに行うために使用。

#### 【使用方法等】

眼科手術・処置の際、スポンジ部分を眼の各組織に当て吸水等を行い、吸水した液体等をポリエチレン袋内に受水させる。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

#### 【保管方法及び使用期間等】

##### 〈保管方法〉

- (1) 水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- (2) 梱包材料に傷を付けたり、ピンホールを生じないように保管すること。

##### 〈有効期間〉

\*\* 包装に記載 [自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

\* Tel: 0120-991-092

\*\* 外国製造業者: Medsorb Dominicana, S. A.

国名: ドミニカ共和国