

類別：機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 JMDNコード：13929001

エッカード氏 Squeezer

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・ Dye Squeezer



- ・ PFC Squeezer



【使用目的又は効果】

眼科において眼内へ液体を注入する単回使用の注射筒として用いる。

【使用方法等】

1. 本品を無菌的に開封する。
2. 滅菌包装から本品の先端部が周りに触れないように取り出す。
3. 本品のニードル接続部（ルアー：オス）に市販の注射針等を接続し、シリンジ接続部（ルアー：メス）に市販のシリンジ又はチュービングを接続する。
4. 市販のシリンジ又はチュービングを介して液体を本品に移した後、本品から市販のシリンジ又はチュービングを外す。
5. ニードル側を下に向け、ニードル先から空気を取り除く。
6. 接続した市販の注射針等を眼内に挿入し、本品のリザーバーを軽く押して液体の注入を行う。
7. 本品は一回限りの使用のみで再使用できないため、使用後は廃棄する。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温、多湿、直射日光、水漏れを避けること。

〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel：0120-991-092

外国製造業者：

Vitrex B.V.

国名：オランダ王国