

医療用品 04 整形用品
 一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

ビジテック サージカルスポンジ

再使用禁止

***【禁忌・禁止】**


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

***【形状・構造及び原理等】**


本品は手術・処置時に施術部周辺の余分な排泄物および薬液等を吸収する目的で使用される。スポンジ(吸収材)と柄からなるサージカルスポンジ 槍型及び LASIK サージカルスポンジ(槍型、膨張型)、スポンジ(吸収材)のみからなるサージカルスポンジ スティック型がある。

代表例:

サージカルスポンジ スティック型

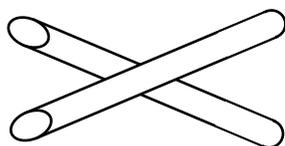

サージカルスポンジ 槍型、LASIK サージカルスポンジ

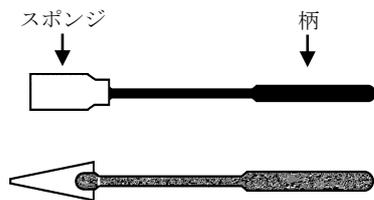

材質;

スポンジ: セルロース、パルプ、ビスコース、PVA または PU

【使用目的又は効果】

手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。

【使用方法等】

- * 本品は、眼科手術時スポンジを用いて施術部および施術部周辺の余分な水分を吸収する。また、LASIK サージカルスポンジ(槍型、膨張型)はスポンジによりフラップの位置を調整する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・LASIK サージカルスポンジを使用時、スポンジが乾燥した状態で、角膜に直接使用しないこと。
- ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。]
- ・使用中にスポンジが外れた場合や本品が破損した場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- * スポンジ材質にアレルギーがある患者には慎重に使用すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

* 〈有効期間〉

(自己認証による。)

製品番号	有効期間
581089, 581060	5年
581064	期限なし(未滅菌)
上記以外	3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

** Tel: 0120-991-092

外国製造業者:

メドソープ ドミニカナ、エス、エイ、

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名: ドミニカ共和国