

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000
メロセル アイキット

再使用禁止***【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- * 本品目は、眼科領域の手術の際に用いる既製造販売届出品を単に構成品を組み合わせ、一つに包装し滅菌したものであり、臨床において直ちに使用出来る。

構成品

No.	販売名等
1	BVI 角膜用ライトシールド
2	BVI メロセル インストルメントワイブ
3	メロセルアイスピア
4	アイドレイン
5	インストルメントワイブ(非医療機器)

原理

本品を無菌的に開封し、各構成品を配置することにより手術等の処置が迅速に行える。

【使用目的又は効果】

- * 本品は、眼科の手術、処置等に使用することを目的とし、迅速な処置や利便性のため必要な医療機器を予め組合せたものであり、当該構成医療機器に該当する既製造販売届出医療機器の製造販売届書に記載のとおり。

【使用方法等】

- ・無菌的に滅菌包装を開封し、含まれる構成品を適切に配置する。
- ・各構成品は、医師の判断のもと、実施する手術、手技の手順に沿って、各構成品の使用法、効能、効果の範囲にて使用する。
- ・施設の手順に従い廃棄する。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

- ・ 本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。〕
- * 構成品の材質にアレルギーがある患者には慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】*〈保管方法〉**

水ぬれに注意し、高温・多湿および直射日光を避けて保管すること。

***〈有効期間〉**

3年(自己認証による。)

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

** Tel: 0120-991-092

**** 外国製造業者:**

メドソープ ドミニカナ、エス、エイ、

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名: ドミニカ共和国