

機械器具 38 医療用鉤
管理医療機器 単回使用眼球固定鉤 13381002

ビーバー シングルユース 固定リング


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は眼科手術・処置において眼球の固定に用いる器具である。

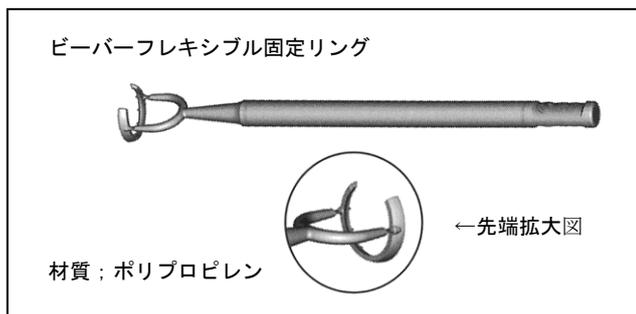

【使用目的又は効果】

眼球の固定等に用いること

【使用方法等】

- ・本品を眼球に押し当てて眼球を固定する。
- ・眼科手術・処置を行う。
- ・施設の手順に従い廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。〕

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

**〈有効期間〉

- 包装に記載〔自己認証(当社データ)による〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

*Tel: 0120-991-092

**外国製造業者:

Beaver-Visitec International, Inc.

国名: 米国