

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 単回使用持針器 12726020**ビジテック シングルユース 持針器****再使用禁止****【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、縫合時に縫合針を把持するように設計されている。縫合針の形状に合わせて様々な種類がある。

代表例:



材質: ステンレススチール

****【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

** 〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証(当社データ)による]

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

*Tel: 0120-991-092

**外国製造業者:

Beaver-Visitec International Limited

国名: 英国

【使用目的又は効果】

ハンドルを持つ手術器具をいう。遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を把持するように設計されている。

【使用方法等】

本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。先端部分が周りに触れないように内部のトレーから取り出し、使用する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、取扱いには十分注意すること。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。
[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

〈相互作用〉

併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器