

機械器具 38 医療用鉤
管理医療機器 単回使用眼球固定鉤 13381002

Malosa シングルユース 固定リング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、眼球の移動、固定に用いる機器である。眼球固定部の寸法を測定することもできる。本品は単回使用であり、再使用はできない。

2. 外観

本品は材質の差異で2種類に分類される。



3. 材質

先端部: ステンレス鋼又はポリカーボネート

【使用目的又は効果】

眼球の固定(位置決め)に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前準備

- 1) 滅菌包装に破損等の異常がないこと確認し、本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。眼球固定部が周りに触れないように滅菌包装から取り出す。
- 2) 本品に破損等の異常がないことを目視で確認する。

2. 使用中の操作

眼球の固定を行う。必要に応じて眼球固定部の寸法を測定する。

3. 使用後の処置

本品は再使用できないので、使用後は廃棄する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

〈相互作用〉

併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- ・電気メスなどの電気手術器

*【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

*〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel: 0120-991-092

外国製造業者:

Beaver-Visitec International Limited

国名: 英国