


PODEYE

単焦点眼内レンズ

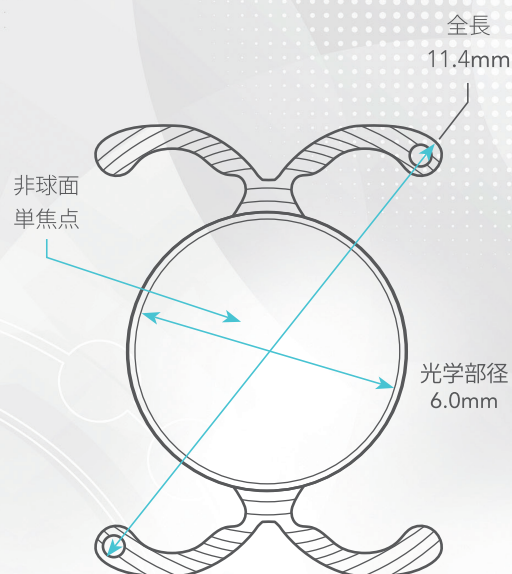

販売名	ポッドアイ		
医療機器承認番号	30500BZX00242000		
モデル名	PODEYE		
原材料	疎水性アクリル(紫外線及び青色光吸収剤含有アクリル樹脂)		
全長	11.4mm		
光学部径	6.0mm		
光学部デザイン	非球面、単焦点		
支持部デザイン	ダブルCループ		
屈折率	1.53		
度数範囲	+10.0 D～+30.0D (0.5D ステップ)		
推奨パラメーター(参考値)	Hoffer Q: pACD	5.85	
	Holladay 1: Sf	2.06	
	Barrett: LF	2.09	
	SRK/T: A	119.40	
	Haigis: a0; a1; a2	1.70; 0.4; 0.1	

販売名	BVIアキュジェクト		
医療機器認証番号	303AIBZX00006000		
対応する BVIアキュジェクト のモデル名	ポッドアイの度数	モデル名	
	+10.0～+24.5D	2.0、2.1、2.2	
	+25.0～+30.0D	2.1、2.2	



ポッドアイ







BVIアキュジェクト

BVIアキュジェクト使用方法

カートリッジと一体型のディスプレイインジェクターのBVIアキュジェクトは、効果的にポッドアイの挿入ができます。

- ① 本体を包装から無菌的に取り出す。
- ② ローディングチャンバーを十分に開く。
- ③ 眼粘弾剤をカートリッジチップ先端、ローディングチャンバー内及びシリコンチップ先端に塗布し約30 秒間待機する。
待機後は速やかに眼内レンズを設置する。
- ④ 眼内レンズをローディングチャンバーの中央に設置する。その際、表裏が正しいかレンズ位置マークで確認する。
- ⑤ ローディングチャンバーのウィングをわずかに閉じ、眼内レンズがローディングチャンバー内の溝に正しく収まっていることを確認する。
- ⑥ ウィングを閉じてローディングチャンバーをロックすると眼内レンズが確実に装填され、挿入が可能となる。
眼粘弾剤は時間とともに滑性を失う可能性があるため、眼内レンズ装填後は速やかに挿入を行う。
- ⑦ プランジャーを前方に押し、眼内レンズをカートリッジチップの先端まで前進させる。その後、プランジャーを数ミリ後方に戻す。
- ⑧ カートリッジチップを創口から眼内に挿入する。
- ⑨ プランジャーをゆっくり前方に押し込み、眼内レンズを嚢内に押し出す。
プランジャーを最後まで押し込むと、シリコンチップがカートリッジチップ先端からはみ出し、創口を傷付ける可能性があるため、プランジャーの押し出しはカートリッジチップ先端の手前で止める。
- ⑩ ゆっくりと眼内レンズを射出し、その後カートリッジチップを眼内から引き出す。

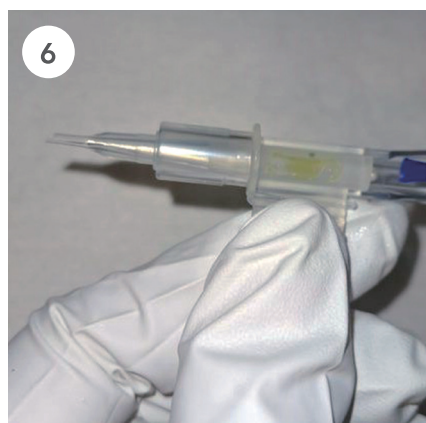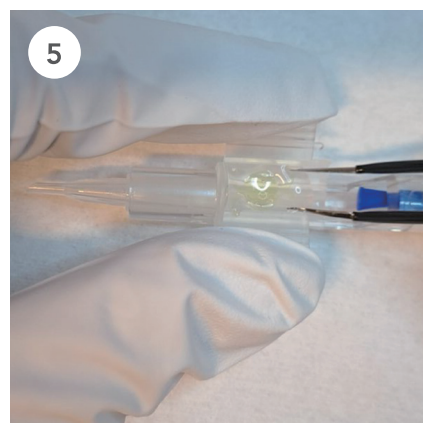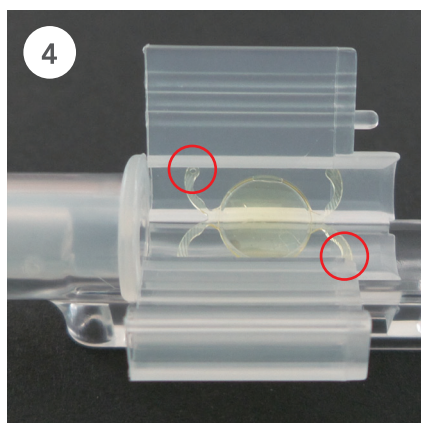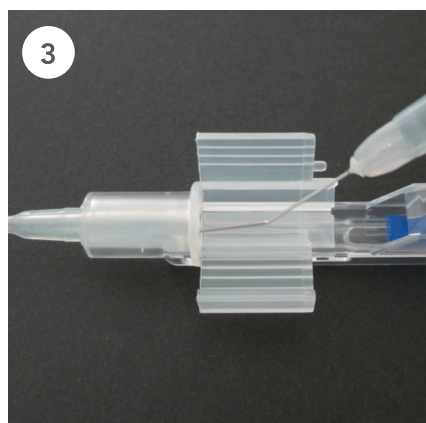

- ご使用に際しては、添付文書をご確認ください。
- 本資料は医家向けです。

製造販売元

ビーバービジュアルインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03- 4545-1425 Fax. 03-4578-0184

メール : ContactUs@bvimedical.com